

Блокнот. Начало работы

Блокнот позволяет создавать заметки с помощью клавиатуры дисплея Focus Blue и сохранять их на микро-SD-карту, которая уже вставлена в ваш дисплей. Чтобы начать использовать Блокнот, включите Focus, затем одновременно нажмите клавиши **Меню+Точки 1+3+4+5**. Блокнот откроет новый файл, где вы сразу же можете вводить текст. Для получения дополнительной информации по использованию Блокнота одновременно нажмите **Правый Shift** и **Точки 1+2+5**, чтобы открылся файл справки.

Если вам необходимо заменить микро-SD-карту, сделайте следующее:

1. Поверните дисплей так, чтобы левая сторона была обращена к вам. Разъём микро-SD-карты — это небольшое узкое отверстие справа от кнопки питания, под защитным выступом.
2. Аккуратно надавите на выступающий край карты, затем извлеките её из разъёма.
3. Возьмите новую карту так, чтобы выступ для ногтя, позволяющий брать карту и вынимать её из разъёма, был обращён к вам и вниз. Вы также почувствуете небольшой выступ на левой стороне и квадратный вырез в верхнем левом углу. Кроме того, карта должна быть обращена этикеткой вниз.
4. Вставьте карту в разъём. Она должна защёлкнуться.

Внимание! Ни в коем случае не вставляйте карту каким-либо другим образом, кроме описанного выше. Неправильная ориентация карты может привести к повреждению SD-карты или вашего Focus Blue.